


Jalkaterän abduktio-ortoosin lisävarusteet idiopaattisen kumpurajalan jatkohoitoon Ponsetin konservatiivisen terapian mukaisesti. Tarkoitettu käytettäväksi erittäin pienten vauvojen tai keskosvauvojen hoitoon tiettyjen tankokenkien erityisen lyhyenä ja kevyenä keskiosana.



Tärkeää tietoa:

| | |
|--------------------------------|---|
| Toimituksen sisältö: | 1 x lyhyt Semeda Mini -tango |
| Tarvikkeet seuraavalle: | ALFA-Flex Light Brace tankokengät BETA-Flex Brace tankokengät |
| Valmistuspäivämäärä: | Tuotteessa/pakkauksessa tämän merkinnän yhteydessä:  |

| | |
|---------------------|---|
| Käyttöikä: | 8 vuotta |
| Työkalu: | kuusiokulma-avain / Torx-avain (tankokenkien yhteydessä) |
| Varastointi: | Suojattava jäätymiseltä ja valolta, keskikorkea ilmankosteus. |
| Puhdistus: | Puhdistus ainoastaan kostealla liinalla, älä käytä voimakkaita puhdistusaineita. |

Käyttö:

Lisätarviketta käytetään tankokenkien keskikappaleena. Tankokenkiä käytetään vastaavien jalkatukien ja tarvittaessa muiden lisävarusteiden kanssa osana jalkaterän abduktio-ortoosijärjestelmää.

Asennettaessa lisätarviketta tankokenkiin on kaikki ruuvit kiinnitettävä kierrelukitteella!


Huomaa:

Lyhyttä Semeda Mini -tangon lisätarviketta koskee
Semedan käyttöohje tunnistenumeroilla: TL 30nn-002
(nn = paikkamerkintä eri kielten numerokoodille)

Malliin ALFA-Flex Light Brace*:

- Löysää ALFA-Flex Light Brace -tankokenkien alatuen ruuvi ensin vain toiselta puolelta. Käytä kiskon mukana tulevaa työkalua: kuusiokoloavainta (SW 4). Varmista, että mikään yksittäinen osa ei katoa.
- Käännä kisko varovasti ympäri. Irrota ylempi alatuki, puolipallo ja kengän kiinnityslevy. Kiinnitä erityistä huomiota painekappaleeseen, jossa on kengän kiinnityslevyn sisäkierre.
- Aseta Semeda Mini -tangon reiällinen tangon pää alemman tuen ruuviin. Tangon yläpää on merkitty vaalealla tuotetarralla, jonka tulee osoittaa ylöspäin. Työnnä ylempi alatuki, puolipallo ja kengän kiinnityslevy ruuviin yksi toisensa jälkeen. Vertaa yksittäisten osien järjestystä ALFA-Flex Light -tangon toisen puolen alkuperäiseen kokoonpanoon ja kuvaan 4. Varmista, että painekappale on asetettu oikeaan asentoon.
- Varmista ruuvit kierrelukitteella. Kiristä alemman alatuen ruuvit tiukkaan. Toista vaiheet 1–3 toiselle puolelle.

* Mallin värit poikkeavat alkuperäistuotteen kuvan väreistä.

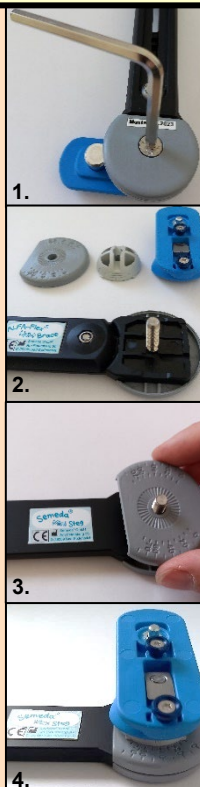

BETA-Flex Brace -mallin asennus:

- Löysää BETA-Flex Brace -tankokenkien roottorikotelon kahta ruuvia kaksi täyttä kierrosta. Käytä kiskon mukana tulevaa työkalua: Torx-avain T10.
- Raota roottorikotelo vetämällä sen alaosa auki. Vedä tanko roottorikotelosta. Toista vaiheet 1–2 toiselle roottorikotelolle. Jalkatanko on nyt purettu kolmeen yksittäiseen osaan.
- Aseta lyhyt Semeda Mini -tango roottorikoteloon. Tangon yläpää on merkitty vaalealla tuotetarralla. Tanko asetetaan roottorikoteloihin siten, että kenkien kiinnityslevyt ja tanko asettuvat kuvan 3 mukaisesti. Paina roottorikotelo uudelleen yhteen niin, että tangon raon kohdalla oleva rako sulkeutuu.
- Tarkista, että roottorikotelo istuu tiukasti paikalleen asetetun Semeda Mini -tangon ympärille. Varmista ruuvit kierrelukitteella. Kiristä roottorikotelon molemmat ruuvit kahdella täydellä kierroksella T 10 Torx -avaimella.

