


Tilbehør i fodabduktionsortosen til opfølgende behandling af idiopatisk klumpfod i henhold til Dr. Ponsetis konservative behandlingsmetode. Anvendes til behandling af meget små eller for tidligt fødte babyer som et særligt kort og let mellemstykke i visse fodabduktionsskinner.



Vigtige informationer:

Leveringsomfang: 1x Sameda Mini bar, kort skinnebar

Tilbehør til: ALFA-Flex Light Brace fodabduktionskinne
BETA-Flex Brace fodabduktionskinne

Fremstillingsdato: På produkt/emballage i henhold til dette tegn: 

Produktlevetid: 8 år

Værktøj: Unbraconøgle/ Torx-nøgle (medfølger fodabduktionsskinnen)

Opbevaring: Frostfrit, beskyttet mod lys, middel luftfugtighed

Rengøring: Kun med en fugtig klud, brug ikke aggressive rengøringsmidler!

Anvendelse:

Tilbehøret sættes ind i fodabduktionsskinnen som et midterstykke. Fodabduktionsskinnen bruges som et system af fodabduktionsortose med tilhørende fodstøtter og, om nødvendigt, yderligere tilbehør.

Når tilbehøret monteres i fodabduktionsskinnen, skal alle skruer sikres med gevindlås!


Bemærk venligst:

For tilbehøret Sameda Mini bar, kort skinnebar gælder Samedas brugsanvisning med identifikationsnummer: **TL 30nn-002**

(nn = pladsholder for numerisk kode af forskellige typer). Sprog)

Sættes ind i ALFA-Flex Light Brace*:

- Løsn skruen på den nederste støtte på kun den ene side af ALFA-Flex Light Brace fodabduktionsskinne indtil videre. Brug det værktøj, der følger med skinnen, til dette formål: Unbraconøgle (SW 4). Sørg for, at ingen af de enkelte dele bliver væk.
- Vend forsigtigt skinnen om. Fjern den øverste støtte, halvkuglen og skostøttepladen. Vær især opmærksom på trykstykket med det indvendige gevind i skoens monteringsplade.
- Sæt Sameda Mini-stangen med hullet i enden af stangen på skruen på den nederste støtte. Toppen af skinnestangen er markeret med et lyst produktmærkat, som skal pege opad. Sæt den øverste støtte, halvkuglen og skostøttepladen på skruen en efter en. Sammenlign placeringen af de enkelte dele med den oprindelige opsætning på den anden side af ALFA-Flex Light bar og fig. 4. Sørg for, at trykstykket er indsat i den korrekte position.
- Fastgør skruerne med gevindlås. Spænd skruen i den nederste støtte. Gentag trin 1-3 på den anden side.

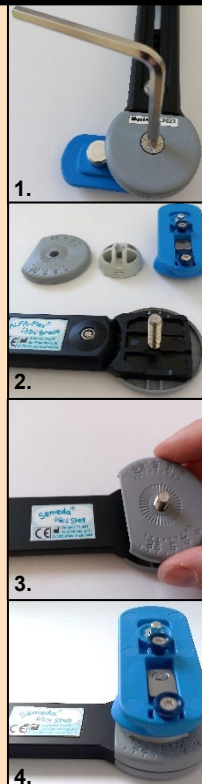

*Farven afviger fra mønsteret på billederne til det originale produkt.

Sættes ind i BETA-Flex Brace:

- Løsn de to skruer på rotorhuset på BETA-Flex Brace fodabduktionsskinne med to hele omgange. Brug det værktøj, der følger med skinnen, til dette formål: Torx-nøgle T 10.
- Træk rotorhuset fra hinanden fra undersiden, et hul bredt. Træk skinnestangen ud af rotorkassen. Gentag trin 1 og 2 for det 2. rotorhus.
- Indsæt Sameda Mini bar, kort skinnestang i rotorhuset. Toppen af skinnestangen er markeret med et lyst produktmærkat. Skinnestangen skal indsættes i rotorhusene, så skomodtagelsespladerne og skinnestangen er placeret som i fig. 3. Tryk de respektive rotorhuse sammen igen, så mellemrummet ved skinnebanen lukkes.
- Kontrollér, at rotorhuset sidder tæt omkring den indsatte Sameda Mini bar. Fastgør skruerne med gevindlås. Stram begge skruer på det respektive rotorhus med to fulde omgange ved hjælp af T 10 Torx-nøglen.

