

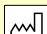
Příslušenství v abdukční ortéze pro následnou léčbu idiopatického pes equinovarus po terapii konzervativní metodou Dr. Ponsetiho. Používá se při léčbě velmi malých nebo nedonošených novorozenců jako zvláště krátký a lehký středový díl určitých abdukčních dlah.

Důležité informace:

Obsah balení: 1x mini spojka Sameda, krátká spojka dlahy

Příslušenství pro:

Abdukční dlahy ALFA-Flex Light Brace
Abdukční dlahy BETA-Flex Brace

Datum výroby: Na výrobku/obalu za tímto znakem: 

Životnost: 8 let



Nářadí: Imbusový klíč/klíč Torx (přiložen k abdukční dlahy)

Skladování: Při teplotách nad bodem mrazu, na místě chráněném před světlem, při střední vlhkosti vzduchu

Čištění: Pouze navlhčeným hadrem, nepoužívejte agresivní čisticí prostředky!

Použití:

Příslušenství se používá v abdukční dlahy jako středový díl. Abdukční dlahy se používá s příslušnými botami a popř. dalším příslušenstvím jako systém abdukční ortézy.

Při montáži příslušenství do abdukční dlahy musejí být veškeré šrouby zajištěny šroubovou pojistkou!

Mějte na paměti:

Pro příslušenství mini spojka Sameda, krátká spojka dlahy platí **návod k použití od firmy Sameda s identifikačním číslem: TL 30nn-002**

((nn = zástupné znaky pro číselné kódy různých jazyků))

Nasazení do abdukční dlahy ALFA-Flex Light Brace*:

1. Nejprve povolte šroub dolní podložky pouze na jedné straně abdukční dlahy ALFA-Flex Light Brace. Použijte k tomu nářadí přiložené k dlahy: Imbusový klíč (SW 4). Dávejte pozor na to, aby se žádná součást neztratila.
2. Opatrně dlahy otočte. Sejměte horní podložku, polokouli a destičku pro upevnění bot. Dávejte pozor zejména na přítlačný prvek s vnitřním závitem v destičce pro upevnění bot.
3. Mini spojku Sameda nasadte otvorem na konci spojky na šroub dolní podložky. Horní strana spojky dlahy je označena světlou nálepkou výrobku; tato nálepka by měla směřovat nahoru. Horní podložku, polokouli a destičku pro upevnění bot postupně nasadte na šroub. Porovnejte uspořádání součástí s původní konstrukcí na druhé straně na spojce ALFA-Flex Light a obrázkem 4. Dávejte pozor na to, aby byl přítlačný prvek nasazený ve správné poloze.
4. Zajistěte šrouby šroubovou pojistkou. Dotáhněte šroub v dolní podložce. Opakujte kroky 1-3 na druhé straně.

* Barevné provedení vzoru na fotografiích odlišné od originálního výrobku



Nasazení do dlahy BETA-Flex Brace:

1. Povolte oba šrouby krytu rotoru abdukční dlahy BETA-Flex Brace o dvě plné otáčky. Použijte k tomu nářadí přiložené k dlahy: Klíč Torx T10.
2. Zespolu roztáhněte kryt rotoru, aby vznikla mezera. Vyjměte spojku dlahy z krytu rotoru. Opakujte kroky 1 a 2 u 2. krytu rotoru. Abdukční dlahy je nyní rozložena na 3 části.
3. Nasadte mini spojku Sameda, krátkou spojku dlahy do krytu rotoru. Horní strana spojky dlahy je označena světlou nálepkou výrobku. Spojku dlahy nasadte do krytu rotoru tak, aby byly destičky pro upevnění bot a spojka dlahy umístěny jako na obrázku 3. Příslušný kryt rotoru opět stlačte, aby se mezera na spojce dlahy zavřela.
4. Zkontrolujte, zda kryt rotoru těsně přiléhá kolem nasazené mini spojky Sameda. Zajistěte šrouby šroubovou pojistkou. Oba šrouby na příslušném krytu rotoru dotáhněte klíčem Torx T10 o dvě plné otáčky.

