

الملحق في جهاز التقويم التبعيدي للقدم لمتابعة علاج حنف القدم مجهول السبب وفقاً لنهج العلاج التحفظي لدكتور بونسيتي. يُستخدم في علاج الأطفال الرضع الصغار أو المبتسرين كقطعة مركزية خفيفة وقصيرة جداً لبعض قضبان تباعد القدم

الاستخدام:

يتم إدخال الملحق في قضيب تباعد القدم كقطعة مركزية. قضيب تباعد القدم مزود بمثبتات مناسبة للقدم، وإذا لزم الأمر، ملحقات أخرى تستخدم كجهاز تقويم تبعيدي للقدم.

عند تركيب الملحق في قضيب تباعد القدم، يجب تأمين جميع البراغي باستخدام مادة تأمين البراغي!

يرجى مراعاة ما يلي:

ينطبق على ملحق الطرف المصغر Semeda Mini، طرف القضيب القصير
دليل استخدام Semeda برقم التعريف: TL 30nn-002
(العنصر النائب للكود الرقمي لمختلف اللغات)



معلومات مهمة:

مجموعة التوريدات:	1 ملحق الطرف المصغر Semeda Mini، طرف القضيب القصير
ملحق لـ:	قضيب تباعد القدم ALFA-Flex Light Brace قضيب تباعد القدم BETA-Flex Brace
تاريخ التصنيع:	على المنتج/ العبوة بعد هذه العلامة:
العمر الافتراضي:	8 سنوات
الأداة:	مفتاح أن/مفتاح توركس (مرفق مع جيرة تباعد القدم)
التخزين:	في حالة خالية من الصقيع، ومحمية من الضوء، ورطوبة هواء متوسطة
التنظيف:	فقط مهندبل رطب، وتجنب استخدام مواد تنظيف حادة!

التركيب في الدعامة BETA-Flex Brace:

1. حل كلا برغي مبيت العضو الدوار لقضيب تباعد القدم BETA-Flex Brace بمقدار لفتين كاملتين. استخدم لهذا الغرض الأداة المرفقة مع القضيب: مفتاح توركس T10.
2. اسحب مبيت العضو الدوار من الجانب السفلي، بحيث توجد بالفعل فجوة بينهما. أخرج الآن طرف القضيب من مبيت العضو الدوار. كرر الخطوات 1 و 2 لمبيت العضو الدوار الثاني. يصبح الآن قضيب تباعد القدم مفككاً إلى 3 أجزاء مفردة.
3. ركب الطرف المصغر Semeda Mini، طرف القضيب القصير في مبيت العضو الدوار. يتم تمييز الجانب العلوي لطرف القضيب بملصق منتج فاتح اللون، يجب أن يتم تركيب طرف القضيب في مبيت العضو الدوار بحيث تكون وضعية ألواح تثبيت الحذاء وطرف القضيب كما هو موضح في الصورة 3. تثبيت الحذاء وطرف القضيب كما هو موضح في الصورة 3. تضغط على مبيت العضو الدوار المعني معاً مرة أخرى بحيث يتم إغلاق الفجوة الموجودة بطرف القضيب.
4. تحقق مما إذا كان مبيت العضو الدوار منغلقاً بإحكام تام حول الطرف المصغر Semeda Mini المربك. أمن البراغي بواسطة مادة تأمين البراغي. اربط كلا البرغين بمبيت العضو الدوار المعني بمقدار لفتين كاملتين باستخدام مفتاح توركس T 10.

التركيب في الدعامة ALFA-Flex Light Brace*:

1. قم أولاً بركب برغي الدعامة السفلية على جانب واحد فقط من قضيب تباعد القدم ALFA-Flex Light Brace. استخدم لهذا الغرض الأداة المرفقة مع القضيب: مفتاح ألن (SW 4). احرص على عدم فقدان أي من الأجزاء المفردة.
2. اقلب القضيب بحرص. اخلع الدعامة العلوية ونصف الكرة ولوح تثبيت الحذاء. انتبه بصفة خاصة للقطعة الانضغاطية ذات القلاووظ الداخلي في لوح تثبيت الحذاء.
3. ركب الطرف المصغر Semeda Mini بحيث تكون الفتحة الموجودة في نهاية الطرف على برغي الدعامة السفلية. يتم تمييز الجانب العلوي لطرف القضيب بملصق منتج فاتح اللون، ويجب أن يكون ذلك موجهاً لأعلى. ركب الدعامة العلوية ونصف الكرة ولوح تثبيت الحذاء على البرغي واحداً تلو الآخر. قارن وضعية الأجزاء المفردة مع البنية التركيبية الأصلية للجانب الآخر بالطرف ALFA-Flex Light Brace والصورة 4. تأكد من تركيب القطعة الانضغاطية في الموضع الصحيح.
4. أمن البراغي بواسطة مادة تأمين البراغي. أحكم ربط البرغي في الدعامة السفلية. كرر الخطوات 1-3 للجانب الآخر.

*ألوان نموذج الصور تختلف عن المنتج الأصلي

