


Das Mittelriemenpolster, Kunststoff Pad II wird als Zubehör in Kombination mit einer Fußhalterung/ einem Orthesenschuh im Bereich des Fußrückens verwendet und dient zur verbesserten Druckverteilung, sowie zur Vermeidung von Druckstellen und Einschnürungen.

PAD II, Größe M: MP-2202-001

PAD II, Größe S: MP-2202-002

BASIS-UDI: 426020155ZBHMRP5B

Wichtige Informationen:

- Lagerung:** frostfrei, bei mittelhoher Luftfeuchte, ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Reinigung:** in der Spülmaschine möglich, keine scharfen Desinfektionsmittel verwenden.
- Entsorgung:** über Hausmüll möglich
- Herstelldatum:** auf Verpackung nach diesem Symbol: 
- Lebensdauer:** 8 Jahre
- Achtung:** Erstickungsgefahr!

Das Einsetzen des Produktes ist nur nach Absprache mit und abhängig von der Einschätzung des Orthopädie-technikers/Arztes vorzunehmen.



Der Zug- /Befestigungsriemen der Fußhalterung wird in die breite Riemenführung des Mittelriemenpolsters gesteckt, wodurch dieses auf den Riemen aufgefädelt wird.



Nach korrektem Einsetzen des Mittelriemenpolsters in den Schuh, sollte dessen Lage auf dem Fußrücken möglichst formschlüssig sein.

Überlappungen, die Druckstellen verursachen könnten, sind zu vermeiden. Das Mittelriemenpolster ist nur bei Füßen einzusetzen, deren Beschaffenheit, dies erlauben.

